

血圧計 A&D medical UA-651BLE ペアリング & 同期方法

データが同期されているか定期的に確認しましょう



はじめに
BluetoothがONに
なっていることを確認しましょう



血圧計A&D UA-651BLE ペアリング方法①

「もっと見る」 「機器と同期」 「機器を追加する」 「血圧計を選択」 「測定器を選択」 「完了」

血圧計A&D UA-651BLE ペアリング方法②

位置情報の要求がある時は、
Android : 位置情報を「許可」
iPhone:Bluetoothの使用を「許可」
手順に沿って 測定器を操作する

ボタンを長押し
血圧計にPrと表示されるのを確認

「ペアリングを開始する」をタップ

「完了」

血圧計A&D UA-651BLE 同期方法

測定する
測定完了後、1分以内に「同期を開始する」をタップ
※ 1分経過すると、次回測定時までBluetoothが起動しません。測定後すぐに同期をしてください。

未転送の測定データは転送時にアプリへすべて同期されます。
複数人で使用する場合は、測定者ごとにその都度データをシンクヘルズに転送してください。

測定後、自動的に機器のBluetoothが起動します。その際にアプリを開いておくと、データは自動的に記録されます。(データ送信の時間や同期の安定性はスマートフォンの種類によって差がございます)

自動送信の様子
画面上部に以下のような表示が出ます

○回分のデータが同期されました



自動同期の条件
①自動同期をONに設定していること
②ペアリング後、手動の同期を1回以上実施していること

シンクヘルズの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルズカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信