

# SoloSmart®との連携手順

血糖値や食事・運動と共にインスリン記録を見直して  
あなたらしいライフスタイルを見つけましょう



## 連携の準備



ON

### ①Bluetooth設定


スマートフォンの  
Bluetooth設定をON



### ②機器の充電

SoloSmart®は  
事前に10分以上充電

## 初回同期手順

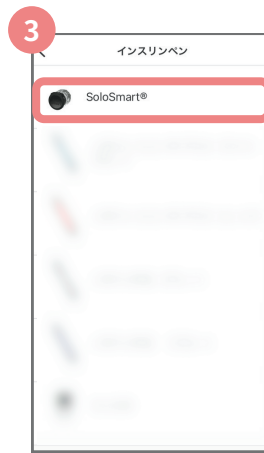

- ①「+入力」→「機器と同期」
- ②「機器を追加する」  
→「インスリンペン」
- ③SoloSmart® を選択



- ④使用中のインスリン製剤を選択
- ⑤「同期を開始する」
- ⑥「次へ」で日時の確認→「確定」






- ⑦「ペアリングを開始する」  
→「ペアリング」をタップ
- ⑧「組み立て」画面に切り替われば  
ペアリング完了。  
インスリンペンに機器を取り付け

※アプリのデザインは変更になる可能性があります。



※画像はイメージです。インスリン製剤を選択される際は、現在ご使用中のものをお選びください。

# 初回同期手順

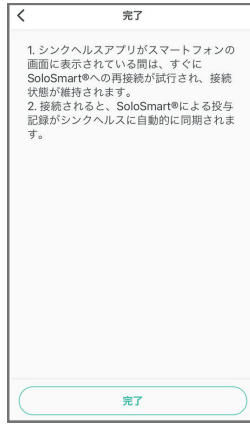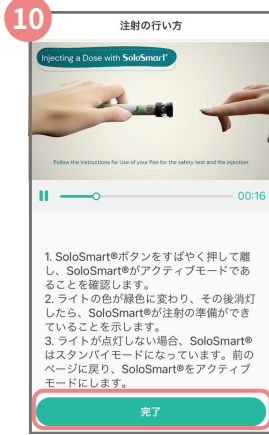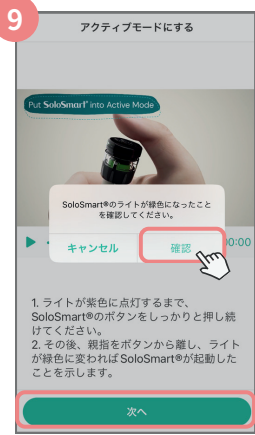


- ⑨ SoloSmart®のボタンを長押し  
 →ライトが**紫色**に点灯  
 →ボタンから指を離すと、ライトが**緑色**に変わる  
 →ポップアップ「確定」  
 \*記録可能なアクティブモードに切替完了
- ⑩ 単位を設定し注射  
 →初回連携後Bluetoothが接続されれば自動でデータが転送

# 個人情報等の提供の確認

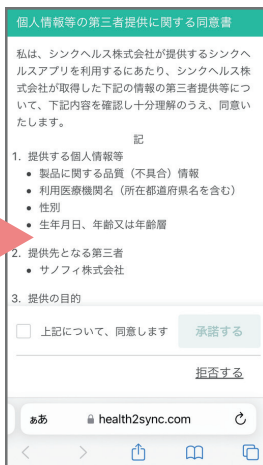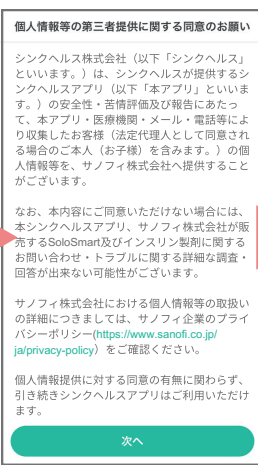

## 初回連携後、「個人情報等の第三者提供に関する同意の確認」が表示

- 情報は、SoloSmart® 及びインスリン製剤に関するお問い合わせ・トラブルの詳細な調査・回答などに活用されます
- 同意は任意です。
- 一度同意しても、いつでも撤回可能です。
- 未成年（15歳未満）の場合は、保護者その他法定代理人に、同意の確認メールが届きます。

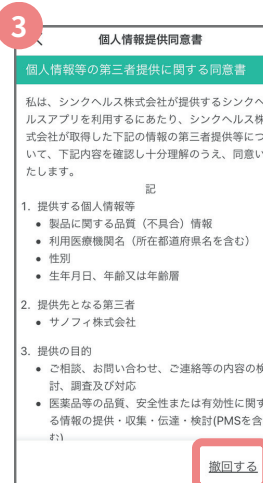

## 同意後は、いつでも同意内容の確認・撤回が可能です

- ① 「機器と同期する」  
→SoloSmart®を選択
- ② 機器の設定「個人情報提供同意書」
- ③ 撤回したい場合は  
右下「撤回する」を選択

シンクヘルスの操作方法などに関するお問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート（平日9:00～18:00）

service.jp@health2sync.com

アプリから:「もっと見る」>「フィードバック」より送信

SoloSmart®に関するお問い合わせ

SoloSmart®対応窓口 0120-142-969

受付時間: 月~金 9:00~17:00 (祝日・会社休日を除く)

※治療に関しては主治医の先生にご相談ください

SoloSmart®(非医療機器)の用途は以下の通りです。

- SoloSmart®は、サノフィ株式会社のインスリン製剤等のペン型注入器ソロスター®により投与された、インスリンの投与情報(投与時刻・投与量)を記録するコネクティッドキャップです。
- SoloSmart®は、記録したインスリン投与情報(投与時刻・投与量)を、対応のアプリ(シンクヘルス)にBluetoothを使って転送します。  
注) SoloSmart®の投与量の記録精度は「99%±1単位」です(BIOPCOR社内テスト)。
- SoloSmart®は、サノフィ株式会社の使い捨てタイプのペン型注入器ソロスター®とのみ互換性があります。

- シンクヘルスアプリ(以下「本アプリ」という)は、サノフィ株式会社と共同開発されたものではなく、サノフィ株式会社による評価及びびいかなる承認を経たものでもございません。
- 本アプリとSoloSmart®との互換性についても、サノフィ株式会社は評価を行ったものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本アプリはシンクヘルス株式会社により開発されたものであり、シンクヘルス株式会社はその利用目的におけるアプリの安全性とパフォーマンスについて、単独で責任を負うものとします。