

NEW

# シンクヘルスは マリア®と連携可能になりました！

血糖値や食事・運動と共にインスリン記録を見直して  
あなたらしいライフスタイルを見つけましょう

マリア®とは？：フレックスタッチ®と連携が可能となりました。シンクヘルス上で記録した血糖値や食事、運動内容とともにインスリン量を照らし合わせて振り返ることができるようになります。


## インスリンと連携した画面（イメージ）



血糖値の推移とインスリンの  
投与状況が把握しやすい



食前・食後の血糖値差と  
インスリンの投与量を見直し

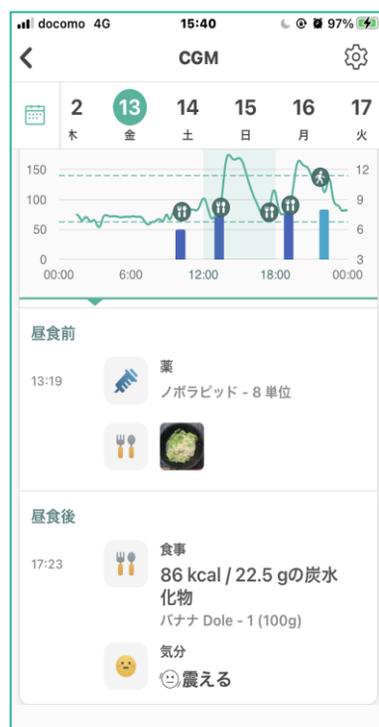

CGMとインスリン量を  
同時に把握

## 初期連携後の同期方法 複数件のデータもまとめて転送可能！



フレックスタッチ®はNovo Nordisk A/Sの登録商標です  
マリア®はBIOCORP PRODUCTIONの登録商標です

# 初期設定：マリヤ®とペアリング（同期）する



①「+」を選択し「機器と同期」をタップ



②「機器を追加する」を選択



③「インスリンペン」を選択



④「マリヤ®」を選択



⑤対象のインスリン製剤を選択



⑥「同期を開始する」を選択



⑦マリヤ®を充電 ※10分以上充電してください



⑧フレックスタッチ®にマリヤ®を装着しスマートフォンから10cm以内に置いてペアリング



⑨投与ボタンを5秒間押しして起動させる



⑩信号灯が緑色になったら起動完了



⑪ポインターが0になっているのを確認後必要な投与量に設定して注射



⑫初回連携後Bluetoothが接続されれば自動でデータが最大100回分転送される。



⑬個人情報（健康データ）をノボノルディスクへ転送することに同意するかの確認



⑭個人情報（品質・安全性に関するデータ等）をノボノルディスクへ転送することに同意するかの確認

※ペアリング（同期）が失敗した際は、①スマートフォン端末のbluetoothリストからマリヤ®を削除、②マリヤ®のリセット操作を行い、再度連携をお試しください。

※マリヤ®をリセットすると本体メモリー内のデータがリセットされますのでご注意ください。（アプリ上のデータは残ります。）

- ・シンクヘルスアプリ（以下「本アプリ」という）は、ノボノルディスクと共同開発されたものではなく、ノボノルディスクによる評価及びいかなる承認を経たものではありません。
- ・本アプリとマリヤ®との互換性についても、ノボノルディスクは評価を行ったものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本アプリはH2株式会社により開発されたものであり、H2株式会社はその利用目的におけるアプリの安全性とパフォーマンスについて、単独で責任を負うものとします。
- ・ノボノルディスクは、本アプリのコンテンツの利用、あるいは本アプリの利用を通して収集された情報の正確性について、一切責任を追うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

シンクヘルス カスタマーサポート  
メールアドレス [service.jp@health2sync.com](mailto:service.jp@health2sync.com)  
(営業時間：平日 9:00 - 18:00)

アプリからお問合せ:「もっと見る」>「フィードバック」

シンクヘルス  
ダウンロードはこちら→



マリヤ®に関するお問合せ  
(治療に関しては主治医の先生にご相談ください)  
ノボケア相談室（マリヤ®専用）  
0120-180710  
受付時間：午前9時から午後5時  
月曜日から金曜日（祝日・会社休日を除く）