

メディセーフフィットスマイルの連携手順

データが同期されているか定期的に確認しましょう

連携手順 Android ※2回目以降も同様の手順



アプリを開く → androidのNFCマークを測定器にかざす → スキャン画面が立ち上がる → 測定器にスマートフォンをかざす → 「完了」

連携手順 iPhone



「入力」 → 「機器と同期」 → 「機器を追加する」「血糖測定器」 → 「メディセーフフィットスマイル」を選択 → 「完了」



スキャン画面が立ち上がる → iPhone上部と測定器をかざす → 「完了」

2回目以降の転送は？

- ① 「入力」 > 「機器と同期」
- ② 「機器と同期する」
- ③ スマートフォンを測定器にかざす

シンクヘルスの
操作方法などに関する
お問い合わせ

シンクヘルスカスタマーサポート (平日9:00~18:00)
service.jp@health2sync.com
アプリから: 「もっと見る」 > 「フィードバック」より送信